

Årskontroll
Barnediabetesregisteret
HbA1c - rekvisisjon

Prøven sendes til:

Oslo Universitetssykehus
Avdeling for medisinsk biokjemi, Aker
Postboks 4959 Nydalen
0424 OSLO

Pasientinfo: For å unngå feil- Bruk stempel /eller maskinskrevet lapp/ skriv tydelig

Navn:

F.nr: (11siffer).....

Adresse:

HbA1c-rekvisisjon- KUN **årskontroll**

<p>Sykehus-/Poliklinikk-info: For å unngå feil- Bruk stempel /eller maskinskrevet lapp/ skriv tydelig</p> <p>Sykehus</p> <p>Rekvirent : For å unngå feil- Bruk stempel /eller maskinskrevet lapp/ skriv tydelig</p> <p>Sengepost <input type="checkbox"/> Poliklinisk <input type="checkbox"/></p>	<p>Leginfo: For å unngå feil- Bruk stempel /eller maskinskrevet lapp/ skriv tydelig</p> <p>Legens navn</p> <p>Legens HPR nummer</p>
--	--

Prøvedato:.....**Kl.:**.....

Prøvene sendes **man/tirs/ons/(tors)** for å unngå forsendelse i romtemperatur over helgen. Prøve tatt fredag settes i kjøleskap og sendes Aker universitetssykehus mandag.

Til den som tar prøven

- Prøvemateriale: EDTA-blod (enten fra EDTA-mikrotainer eller vanlig EDTA-glass)
- Pasientinformasjon: **Vær nøye med fullt** fødselsnummer **og** pasientens postnummer, og tydelig rekvirentens informasjon. Bruk lapper fra DIPS som er entydige og merk av sengepost eller poliklinikk.

Til den som mottar prøven på Avdeling for medisinsk biokjemi, Aker

- Rekvisisjonene registreres på vanlig måte, finn riktig rekvirent og lege.
- Rekvirer analyseprofilen **pdia**. I dialogboksen som kommer frem, trykk insert og velg årskontroll. Da vil riktig kommentar komme automatisk.
- EDTA-glasset går til TOSOH-G7 for analysering av HbA1c